



LifePad® REANIMATIONSHILFE



- ✓ Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reanimation
- ✓ Einfache Positionierung
- ✓ Visuelles Feedback
- ✓ Akustischer Rhythmus
- ✓ Flexibles Material
- ✓ Kompakte Größe

LifePad® WANDHALTERUNG



- ✓ Hochwertig
- ✓ Einfache Öffnung
- ✓ Aufgedruckte Beschreibung
- ✓ Einfache Montage

LifePad®

Erste Hilfe – sicher und schnell

LifePad®
Reanimationshilfe



Das LifePad® ist ein Produkt der Innotas AG und der Beurer GmbH, in Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung.



NISPEL GmbH

Medizintechnik **seit 1999**


☎ 0 23 63 / 36 63-0 📠 0 23 63 / 36 63-11
🖱 www.nispel.de 📧 kontakt@nispel.de

🏠 Höttingstraße 91 - 45711 Datteln



LifePad®

Dein Helfer
im Notfall

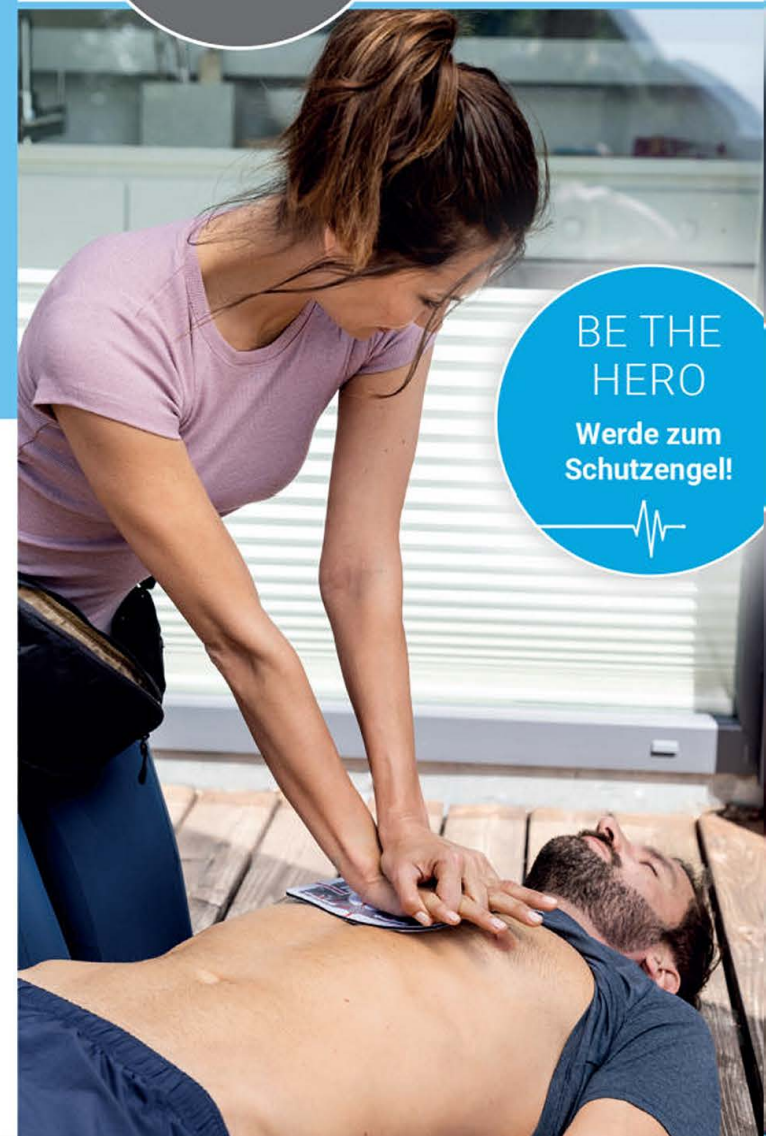

BE THE
HERO
Werde zum
Schutzengel!



www.lifepad.net

Schritt-für-Schritt- Anleitung zur Reanimation

1



Bewusstsein und
Atmung überprüfen

2




Notruf absetzen

3



Oberkörper frei machen

4

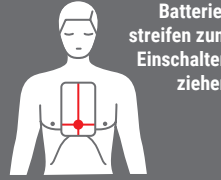

LifePad® auflegen

5

Drücken
5 - 6 cm



100 x/min

Kompression durchführen

6



Entlasten
5-6 cm

Brustkorb wieder entlasten



Schritt 5 und 6 im Rhythmus des Signaltons wiederholen (Ton = Drücken), um eine Frequenz von 100 Kompressionen pro Minute zu gewährleisten.

Die Herzdruckmassage wird durchgeführt, bis wieder deutliche Lebenszeichen wahrnehmbar sind oder der Notarzt übernimmt.

Wussten Sie, dass ein Herzstillstand häufig zu Hause oder auf der Arbeit passiert?

Ein Herzstillstand kann jeden treffen – meistens unerwartet

Mit dem LifePad® kann sofort geholfen werden

Wird nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand nicht umgehend behandelt, sinkt die Überlebenschance in jeder Minute, die vergeht, um 10 % – das menschliche Gehirn kann nur wenige Minuten ohne Sauerstoff überleben.

Durch die Herzdruckmassage gelangt der Sauerstoff im Körper zu den lebenswichtigen Organen.


Was macht das LifePad® aus?

Sollte der Ernstfall eintreten, sind viele Ersthelfer zunächst überfordert. Das LifePad® leitet Sie bei der Reanimation an und hilft Ihnen, die richtigen Schritte sicher durchzuführen.

Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LED's erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck.

Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor.

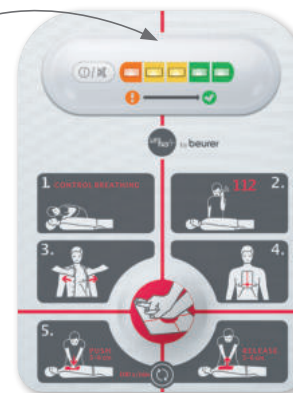

DIE HÄUFIGSTEN ANWENDUNGSFÄLLE

Einfache Anwendung und immer dabei

**LIFE
PAD**

Im Straßenverkehr



In der Freizeit



Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden. Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation. Das Gerät kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).

Auf der Arbeit

